



# MODE D'EMPLOI

## Montage :

Clipper les visières dans l'ordre ci-dessous, côté évidé vers le haut.

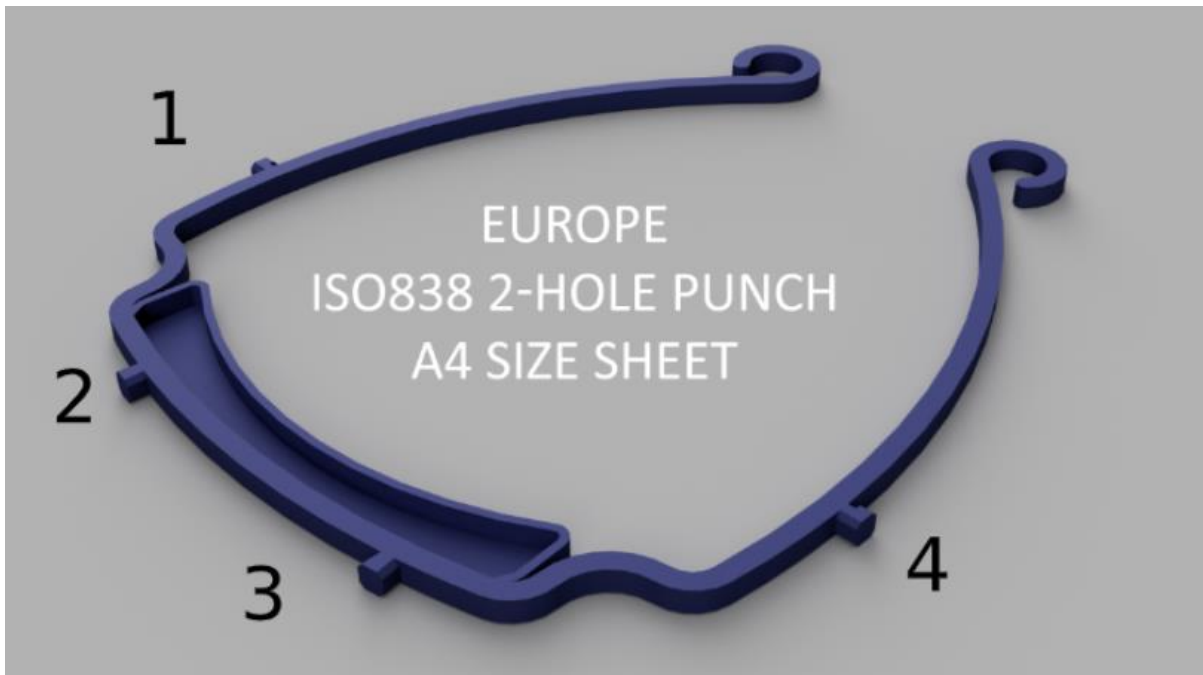

N'hésitez pas à couper les coins inférieurs pour plus de confort :

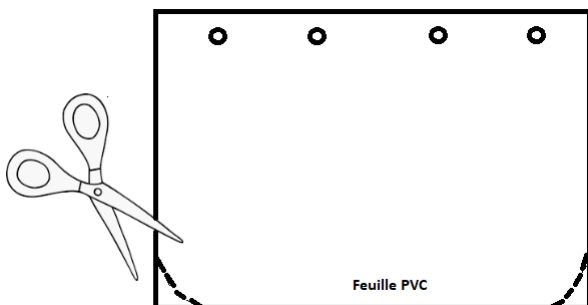

## Entretien :

Lavage et décontamination aux détergents classiques ou gel hydroalcoolique (rincer en cas de traces persistantes).

Essuyage doux avec tissu microfibre pour éviter de les rayer trop vite, toujours sur visière humide.

## Réglage :

Pour plus de serrage, ajouter un élastique dans les anneaux ou chauffer légèrement avec un sèche-cheveux entre les repères 1 et 2 puis entre les repères 3 et 4 en posant le serre tête (feuille démontée) sur une surface plane (type carrelage) et serrer ou desserrer à sa guise. Laisser refroidir quelques secondes avant de reprendre le serre-tête.

Plus d'infos sur

<http://www.leslunettesdelouisa.fr/visieres-covid-3d/>

## **Prenez soin de vous !**

*Les Lunettes de Louisa 18 Place de l'église 86240 Iteuil Tel : 05.49.30.62.23*